


VDS

VITALI DISINFECTION SYSTEM

SISTEMA CERTIFICATO
DI DISINFEZIONE
E SANIFICAZIONE DEL RIUNITO

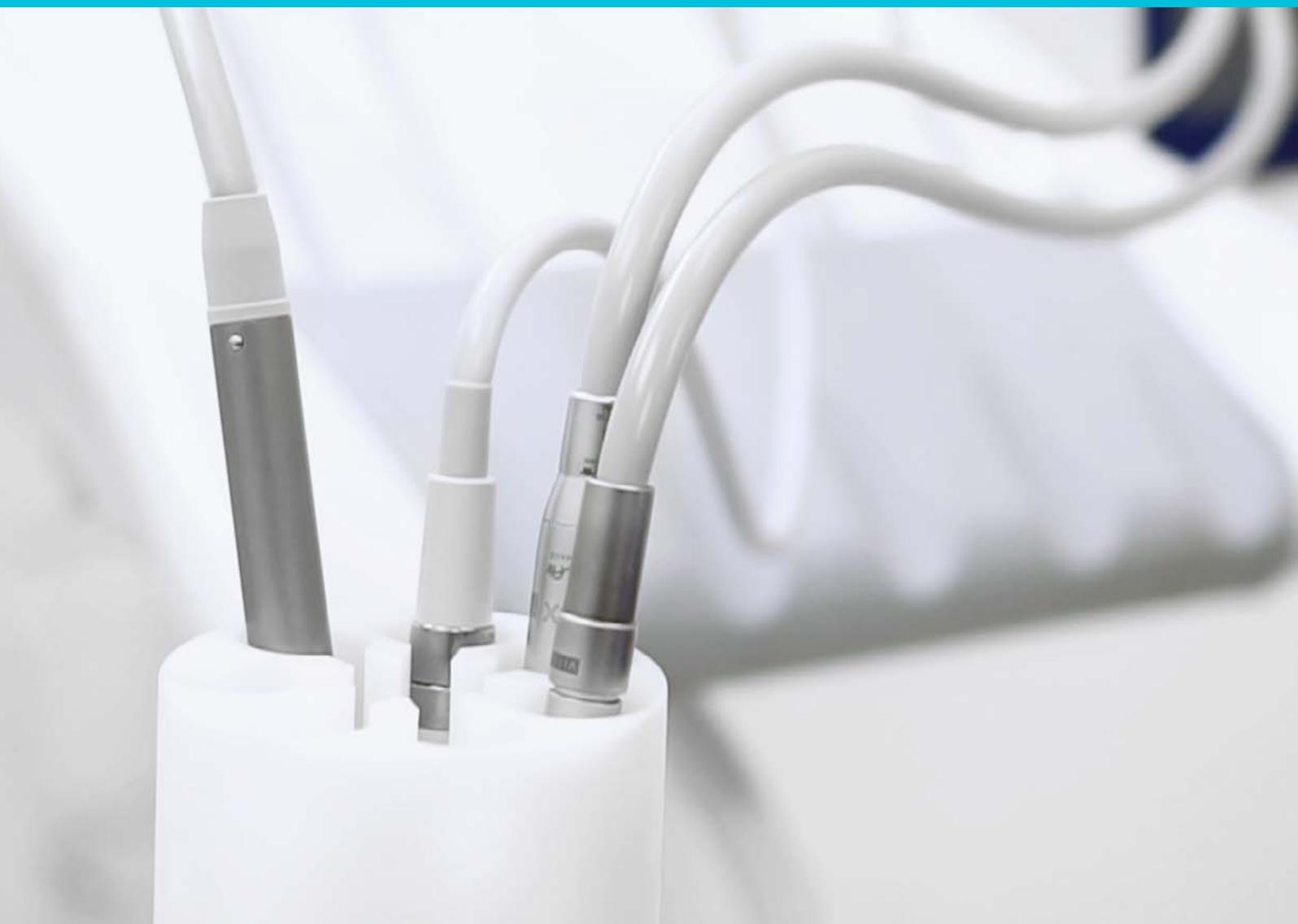

LOGLIFE DENTAL UNITS

VITALI

www.vitali.com


VDS

La soluzione MADE IN VITALI al problema della disinfezione e della sanificazione del riunito

Il **VDS** (Vitali Disinfection System) è il nostro sistema certificato di disinfezione e sanificazione del riunito odontoiatrico. L'abbiamo ideato nel reparto Ricerca & Sviluppo **VITALI** e fatto testare da laboratori qualificati.

Il **VDS** è un dispositivo complesso che combina tecnologie all'avanguardia, dispositivi medici e procedure collaudate. È stato dimostrato che il **VDS** è efficace nella riduzione della contaminazione batterica presente nel circuito idrico del riunito, contribuendo a ritardare la formazione del biofilm. Il dispositivo medico **Multiclean**, utilizzato per la disinfezione, è in grado infatti di esplicare un'importante azione di contrasto nei confronti di batteri (come la Legionella pneumophila), funghi, HIV, HBV e HCV.

Tutti i nostri riuniti possono montare a richiesta il sistema **VDS**. L'integrazione però deve essere predisposta all'acquisto: non si può applicare il **VDS** a un riunito **VITALI** già consegnato e operativo.

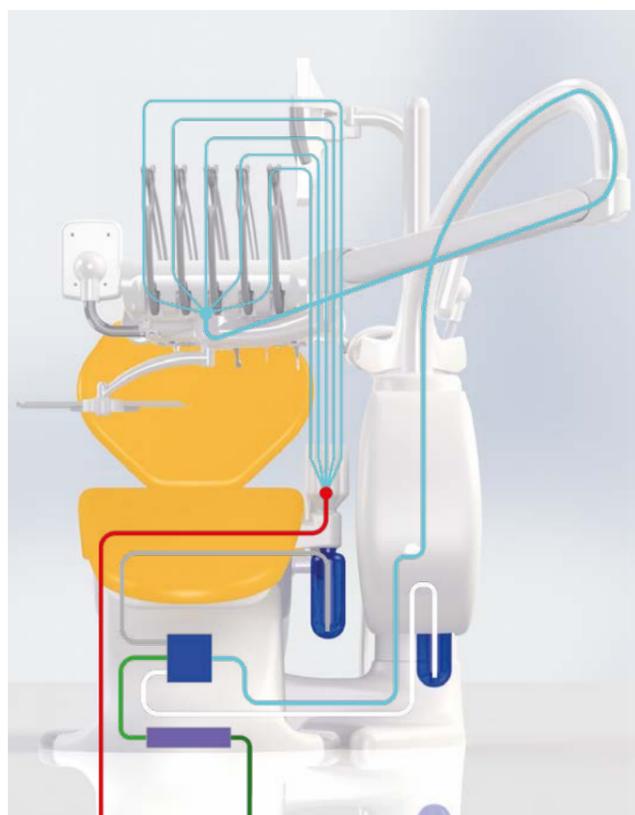

VDS

Questi sono gli elementi che compongono il sistema VDS



COLLETORE
in cui vanno collocati
gli strumenti per la disinfezione

FLACONE
per il disinfettante
ad ampio spettro Multiclean

FLACONI PRESSURIZZATI
per l'alimentazione alternativa
degli strumenti con liquido sterile

FILTRO STERILIZZANTE ARIA
in ingresso al riunito

LAMPADA RAGGI UV
che tratta l'acqua di rete
in ingresso al riunito

DISPOSITIVO ANTICALCARE
che previene la formazione
di calcare nel circuito idrico



Posizionamento standard del collettore porta strumenti



Posizionamento del collettore in presenza di valvola drenaggio bacinella



Flacone per il disinfettante Multiclean



Flaconi pressurizzati per il liquido sterile

VDS

Scopriamo come funziona

- Semplice** > Il sistema **VDS** è completamente automatico ed è dotato di dispositivi di sicurezza, per cui tutto quello che dovete fare per metterlo in funzione è estremamente semplice.
- Sicuro** > Per la sicurezza vostra, della vostra assistente e dei vostri pazienti, è consigliabile procedere alla disinfezione completa del circuito idrico degli strumenti dopo ogni trattamento odontoiatrico.
- Pratico** > Basta posizionare gli strumenti nel collettore, aprire i rubinetti degli spray e avviare il sistema.
- Veloce** > Potete impostare due cicli: quello **FAST**, della durata di 5 minuti, e quello **SLOW**, che dura 10 minuti. Nel **T5 MASTER** e nel **T5 EVO PLUS** tutte le funzioni del sistema sono controllate da un'unica tastiera di comando, nel **V8 TOUCH** il controllo è effettuabile direttamente dalla schermata della tastiera Touch.
- Protetto** > Per avere la massima sicurezza, soprattutto nei trattamenti con chirurgia, il **VDS** vi offre la possibilità di utilizzare il liquido sterile in alternativa all'acqua di rete. Questa opzione rappresenta un'ulteriore protezione contro le contaminazioni.




Tastiera per T5 MASTER e T5 EVO PLUS



Tastiera per V8 TOUCH

VDS

Questo è quello che potete fare con il VDS

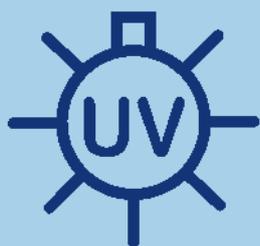

Trattare con raggi UV
l'acqua di rete in entrata
al riunito riducendo l'eventuale
presenza di carica batterica



Disinfettare il circuito idrico
con il dispositivo medico
ad ampio spettro
Multiclean




Sanificare attraverso
il filtro sterilizzante
l'aria in ingresso
al riunito



Utilizzare il liquido sterile
al posto dell'acqua di rete
per tutti gli interventi
che richiedono più sicurezza

Quando acquistate il prossimo riunito valutate bene la soluzione che offre più sicurezza a voi, ai vostri collaboratori e ai vostri pazienti: scegliete un riunito **VITALI** con il sistema **VDS** integrato.

[clicca per guardare il video](#)

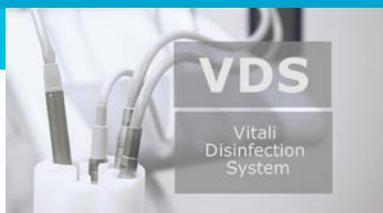

LONGLIFE DENTAL UNITS

VITALI

www.vitali.com